

DIMAR

Medical Devices

DimAir Line



GENERATORE VENTURI CPAP

EASY FLOW

Il Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" è realizzato per creare una miscela gassosa Aria/Ossigeno a flussi elevati idonea alla somministrazione di terapie in CPAP.


- Il dispositivo Venturi ad alta efficienza utilizza la pressione dell'Ossigeno presente nelle bombole o nei reparti ospedalieri per creare una miscela gassosa di Aria e Ossigeno, a flussi elevati e regolabili.
- Il dispositivo è in grado di generare flussi elevati e continui fino a 180 L/min:
 - Per una corretta terapia CPAP con interfaccia casco occorrono flussi aria/ossigeno elevati per evitare il «rebreathing» della CO₂.
- Il sistema è dotato di doppio flussimetro con scala 15+30 L/min.
 - Agendo sul flussimetro principale, il generatore preleva dall'ambiente una quantità d'aria che, sommandosi al flusso di ossigeno, determina una % di ossigeno di circa 30%.
 - Agendo sul secondo flussimetro, è possibile regolare la FiO₂ dal 30% al 100%.
 - Completo ed efficiente controllo del consumo di ossigeno e calcolo dei valori di flusso e FiO₂ somministrati al paziente mediante una tabella dei rendimenti fornita in abbinamento al prodotto.
- Il sistema consente di gestire una efficace terapia CPAP con flussi idonei anche applicando pressioni di PEEP elevate (20 cmH₂O).
- Il sistema è compatibile con diverse interfacce paziente come maschere oronasali, maschere Total Face e caschi CPAP.
 - Connessione 22M (ISO 5356-1) per la connessione di tubatismi.
- Dotato di un solo accesso per il prelievo dell'aria esterna.
 - Connessione 22F (ISO 5356-1) per la connessione di un filtro.
- Il dispositivo è collegabile direttamente a una singola fonte di ossigeno in pressione (3,5 bar).
 - Disponibili connessioni dei più comuni standard (UNI, DIN, AFNOR).
- Leggero, portatile. Superfici atte a una facile pulizia e sanificazione.
- Possibilità opzionale di fissaggio a trave testa letto o asta porta flebo con apposito morsetto di fissaggio.

CARATTERISTICHE:

- Portata: 15 ÷ 180 L/min (>200 L/min)
- FiO₂ : 0,30 ÷ 1 (30% ÷ 100%)

VERSIONI:

- Generatore Venturi CPAP Easy Flow
- Generatore Venturi CPAP Easy Flow con Manometro
- Generatore Venturi CPAP Easy Flow con Attacco a Stativo

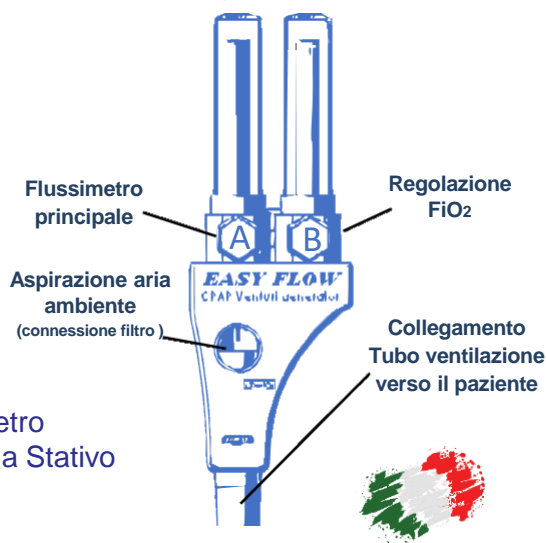

Nome commerciale e Modello	Codice	RDM	CND
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW"	700/6361		
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" con manometro	700/6361-M	2419431	Z12030102
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" con connessione a treppiede	700/6361S		