

DIMAR

Medical Devices

DimAir Line

Ambulanza
Pronto Soccorso




**MASCHERA
EASY VENT EMERGENCY**

Sistema CPAP "E.V.E. Mask" per la somministrazione di miscele aria/ossigeno in tecniche CPAP ad alto flusso su pazienti ipossiemicici in edema cardiogeno o insufficienza respiratoria acuta (IRA). Dotato di dispositivo Venturi in grado di erogare fino a 120 Lt/min. Kit leggero e pratico, utilizzabile in Ambulanza, Pronto Soccorso e nei reparti ospedalieri, in presenza di un'unica bombola di ossigeno o flussimetro. La regolazione del flusso determina il PEEP somministrato al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Venturi monouso integrato ad alta efficienza
- Monopaziente.
- Maschera con cuscinetto anatomico regolabile.
- PEEP regolabile da 5 a 20 cmH₂O senza soluzione di continuità.
- Manometro integrato per il costante controllo e regolazione della pressione applicata.
- Raccordo per la somministrazione di ossigeno o controllo della EtCO₂.
- Tubo alimentazione ossigeno di 2 metri
- Nucale regolabile, applicazione e fissaggio rapidi
- Latex e DEHP Free

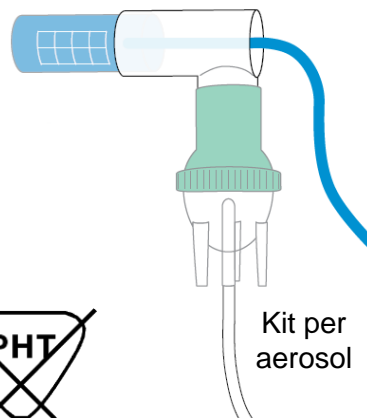

VANTAGGI

- Estremamente Rapido, Pratico ed Efficace.
- Monitoraggio continuo della pressione applicata anche in presenza di perdite.
- L'efficacia del sistema consente la somministrazione di pressioni fino a 20 cmH₂O.
- Ridotto consumo di ossigeno per una maggior durata della bombola.
- Per il suo funzionamento è sufficiente una sola fonte di ossigeno quale flussimetro o bombola.
- Possibilità di somministrare aerosol tramite apposito kit (cod. 700/5066).

TABELLA RENDIMENTI :

Flusso/Pressioni/O₂%

Flusso ottenuto 60 Lt/min. circa

Flusso Lt./min	PEEP approx	Conc. O ₂ approx
5	5	40%
6	7	40%
7	9	40%
8	11	40%
9	14	40%
10	16	40%
11	19	40%

RIFERIMENTI:

CODICE	TAGLIE	RDM	CND
700/6413	PED/ADULTI (S/M)	2418636	R0301010202
700/6414	ADULTI (L/XL)		

- In confezione Singola

- Confezione multipla da 10 pezzi

Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta

DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 – 41036 Medolla – MO – I

Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328

Mail: info@dimarspa.com

