

**DIMAR**

PRODUCT LINE

# *DimAir Line*




**GENERATORE VENTURI CPAP**  
**EASY FLOW**

**Il Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" è realizzato per creare una miscela gassosa Aria/Ossigeno a flussi elevati idonea alla somministrazione di terapie in CPAP / HFNC**

- Il dispositivo Venturi ad alta efficienza utilizza la pressione dell'Ossigeno presente nei reparti ospedalieri o nelle bombole per creare una miscela gassosa di Aria e Ossigeno, a flussi elevati e regolabili
- Il dispositivo è in grado di generare flussi fino a 180 l/min:
  - Per una corretta terapia CPAP con interfaccia casco o maschera occorrono flussi aria/ossigeno elevati per evitare il «rebreathing» della CO<sub>2</sub>
- Il sistema è dotato di doppio flussimetro con scala 15 ÷ 30 l/min:
  - Agendo sul flussimetro principale, il generatore preleva dall'ambiente una quantità d'aria che, sommandosi al flusso di ossigeno, determina una % di ossigeno del 30% circa.
  - Agendo sul secondo flussimetro è possibile arricchire e regolare la FiO<sub>2</sub> dal 30% al 100%
  - Completo ed efficiente controllo del consumo di ossigeno e determinazione dei valori di flusso e FiO<sub>2</sub> somministrati al paziente mediante una tabella dei rendimenti fornita in abbinamento al prodotto
- Il sistema consente di gestire una efficace terapia CPAP con flussi idonei anche applicando pressioni di PEEP elevate (20 cmH<sub>2</sub>O)
- La versione con manometro integrato consente il monitoraggio della pressione interna all'interfaccia del paziente
- Adatto per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Il sistema è compatibile con diversi tipi di interfaccia paziente come maschere oronasali, maschere Total Face, caschi CPAP e cannule nasali
- Connessioni ISO 22M e ISO 22F
  
- Dotato di innesto dedicato (UNI, DIN, AFNOR) per la connessione all'impianto ospedaliero o alla bombola di ossigeno
- Leggero, portatile e con superfici atte a una facile pulizia e sanificazione
- Possibilità opzionale di fissaggio a trave testa letto o asta porta flebo con apposito morsetto di fissaggio

## CARATTERISTICHE:

- Portata: 15 ÷ 180 l/min
- FiO<sub>2</sub> : 0,30 ÷ 1 (30% ÷ 100%)

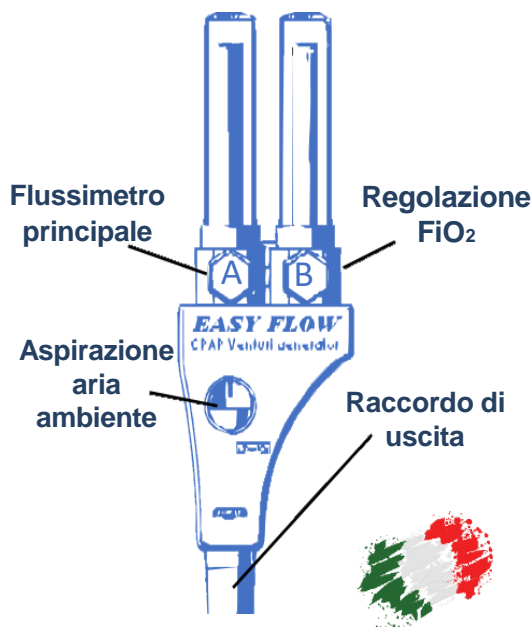

NOME COMMERCIALE	CODICE	RDM	CND/EMDN
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW"	700/6361	2683529	Z12030102
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" con manometro	700/6361-M		
Generatore Venturi CPAP "EASY FLOW" con connessione a stativo	700/6361S		



**HMC Premedical S.p.A**

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I  
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546



0425